

# NOTICE D'UTILISATION C2L

COUCHAGE MEDICAL COCCOON C2L - Déshabillable – Non sécurisé



**COCCOON N'EST PAS UN SECURIDRAP, NI UN PYJADRAP** - Marque déposée INPI – Dispositif breveté. Ce matériel fait l'objet de déclarations en matière de vigilance auprès de L' A.N.S.M.

## RECOMMANDATIONS DE SECURITE

Le coussin Coccoon doit être utilisé sur des barrières de lit relevées. Le coussin doit être relié au minimum en position milieu à la hauteur du bassin avec 1 L3000 ou 2 L115. Le coussin sera ajusté au niveau des bras grâce au réglage interne des emmanchures. La fermeture à glissière doit être verrouillée. A chaque utilisation, la fermeture à glissière, les coutures et l'usure du tissu doivent être vérifiées.

## AVERTISSEMENT

**PRESCRIPTION MEDICALE :** Le coussin COCCOON est un moyen de maintien physique et doit être prescrit par le prescripteur médical habituel.

**LES PREMIERES UTILISATIONS :** Pratiquez une observation du patient lors des premières utilisations. Si un doute, une agitation ou un stress est détecté demandez l'avis du prescripteur médical.


**INCOMPATIBILITE :** Certains patients peuvent se sentir enfermés, souffrent de claustrophobie ou vivent le coussin comme une rupture avec les habitudes.

**AVANT TOUTE UTILISATION :** Bien lire ce mode d'emploi du Coccoon. S'assurer du bon fonctionnement du lit médical, des barrières de lit et de la qualité de la literie. Le Coccoon ne doit pas palier les dysfonctionnements des autres dispositifs.

**BARRIERES DE LIT :** Les barrières de lit doivent être maintenues relevées lors de l'utilisation du coussin



## ENTRETIEN

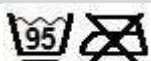

LE COUCHAGE C2A PEUT ETRE LAVE A 95°C. LA PRINCIPALE USURE DU COCCOON SERA PROVOQUEE PAR LE LAVAGE. A 60°C LE COCCOON POURRA ETRE LAVE PLUS DE 400 FOIS. ATTENTION AU SECHAGE ET NE JAMAIS DEPASSER 90°C. PROSCRIRE : NETTOYAGE A SEC ET SOLVANTS. NE PAS REPASSER.

LA FERMETURE A GLISSIERE DOIT ETRE IMPERATIVEMENT FERMEE AU LAVAGE ET AU SECHAGE. NE JAMAIS REPASSER ET CHAUFFER LA FERMETURE A GLISSIERE.

LIAISON 3000 ET LIAISON L115 DOIVENT ETRE IMPERATIVEMENT FERMEES LORS DU LAVAGE A 90°C ET AU SECHAGE. NE JAMAIS REPASSER ET CHAUFFER.

ALESE C1A LAVAGE A 90°C. PROSCRIRE LE NETTOYAGE A SEC ET TOUT SOLVANT. NE JAMAIS REPASSER.

## CHOIX COUCHAGE ET LIAISONS

EVALUER LE PATIENT		code	
SA FORCE PHYSIQUE	SES CAPACITES DE DESHABILLAGE	non	*****
ASSOCIATION COUCHAGE ET LIAISONS		non	****
		peu	***
		pas	**
		très	*


RESISTANCE A LA FORCE PHYSIQUE	RESISTANCE AU DESHABILLAGE				
	référence coussin	association 0 liaison	association 2 L115	4 L115	association 1L3000
C1L	▲	▲	▲	▲	▲
C2L	▲	**	**	**	**
C2A	▲	**	****	****	****
C2R	▲	****	*****	*****	*****

## LES ELEMENTS D'UN COUCHAGE

Le coussin C2L Tissu Toile 150 g/m<sup>2</sup> coton. Fermeture à glissière structure polyester Rubans latéraux polyester Liaison 3000 (fixation sous le sommier du lit) 100 % polyester – boucles nylon / acétal Liaison L115 (fixation latérale sur les traverses du sommier) 100 % polyester – boucles nylon / acétal Alèse C1A (Protection interne du coussin) tissu 100 % coton – Film polyuréthane

## Description du coussin

Le coussin COCCOON se démonte grâce à sa fermeture à glissière et se compose de deux parties : l'avant (le dessus) et l'arrière (le dessous).

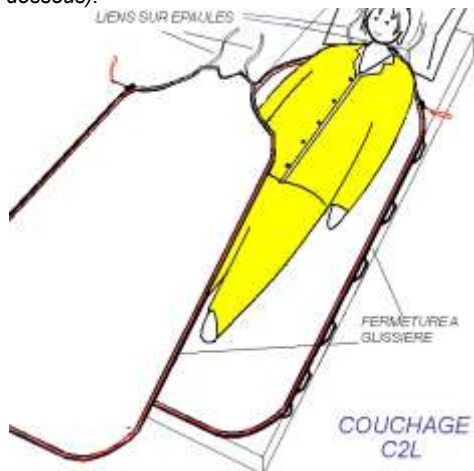

- (1) Curseurs (deux curseurs de fermeture du coussin)
- (2) Passants d'ancrage et de manutention (six passants)
- (3) Boucles d'accrochage d'alèse (quatre boucles d'alèse)

## Mode opératoire

### I - Positionner la partie arrière sur le lit




A ce moment, ancrez le coussin sur le lit (voir liaisons coussin / lit). Vous pouvez également positionner une alèse si nécessaire (voir alèse)

### II - Couchez la personne dans le lit sur la partie arrière



### III - Placer la partie avant du coussin sur la personne

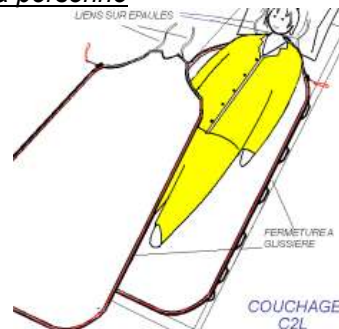

Fermez la fermeture à glissière. Vous pouvez à ce moment lier les liens sur les épaules. Vous pouvez régler maintenant le passage des emmanchures en resserrant plus ou moins les liens

### IV - Fermer le coussin sur la personne



Fermez la fermeture à glissière en amenant les deux curseurs vers le bas ou le côté en plaçant les curseurs au pied du coussin pour le rendre inaccessible.

Manipuler avec précaution la fermeture. Il ne faut jamais forcer sur la fermeture, toujours revenir en arrière lors d'un coincement et ne jamais utiliser de pinces, ciseaux ou outils quelconques.

Lors des manipulations de la fermeture à glissière, vérifiez l'état de celle-ci. Si une ou plusieurs dents sont cassées ou si la fermeture est taillée et dégradée n'utilisez pas le coussin et retournez-le pour réparation



.../...


## Liaison couchage / lit

Vous devez impérativement relier le couchage au lit. La liaison couchage/lit se réalise avec des liaisons. L'ancrage du Coccoon se réalise à partir des six passants (2) situés sur la partie arrière du couchage. Bien analyser le lit médical qui est utilisé afin de bien positionner les liaisons. Le couchage doit être toujours utilisé barrières de lit relevées.




Vous pouvez utiliser :

- a) 2 passants du milieu avec barrières de lit (confort maximum position assise liberté des jambes), vous devez impérativement relier ces deux passants au lit.
- b) 4 passants (milieu et bas) avec barrières de lit.
- c) 6 passants (milieu, bas et haut) avec barrières de lit.

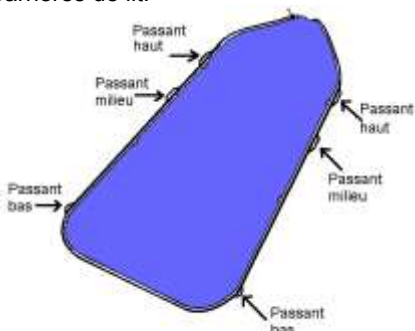


POINTS D'ANCRAGE COUCHAGE / LIT

L115 - L1000 Liaison 1000 pour utilisation latérale

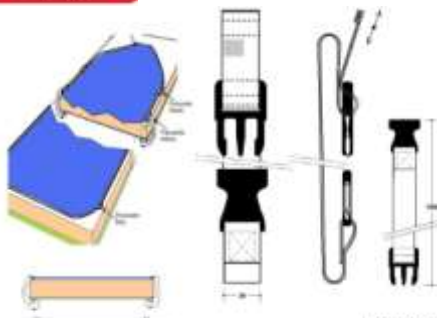

UTILISATION DES LIANONS L1000 SUR LIT MEDICAL

L3000 - Liaison 3000 pour utilisation sous le sommier

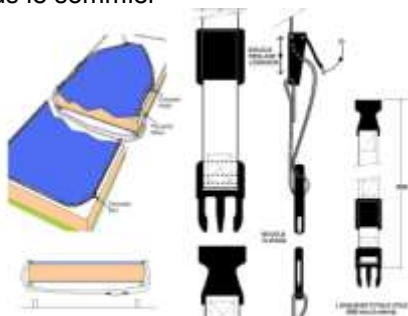

UTILISATION DES LIANONS L3000 SUR LIT MEDICAL

## Utilisation d'une alèse (option)

Pour mieux gérer les fuites et éviter les débordements sur le couchage et la literie, une alèse se positionne sur la partie arrière du couchage



L'alèse se fixe aux quatre angles avec des lacets sur les boucles (3) d'accrochage d'alèse (quatre boucles d'alèse)

## Maintenance

Ce dispositif médical doit être vérifié régulièrement. L'usure due à l'utilisation et au lavage peut être importante. A chaque utilisation le couchage doit être examiné. Si une usure du tissu, des coutures ou une dégradation de la fermeture à glissière sont constatées retirez le couchage et donnez-le en réparation. Votre fournisseur vous apportera l'expertise en matière de maintenance des dispositifs médicaux de Classe 1.



www.coccoon-tm.fr

Couchage Médical  
COCCOON C2L (léger)



3 770000 587044

COCCOON  
1 rue de l'Abani  
BP30032

57535 MARANGE-SILVANGE

Tél +33 3 87 51 55 97 Fax +33 3 87 51 92 84  
www.coccoon-tm.fr contact@coccoon-tm.fr