




## Liaison couchage / lit

Vous devez impérativement relier le couchage au lit. La liaison couchage/lit se réalise avec des liaisons. L'ancrage du Coccoon se réalise à partir des six passants (2) situés sur la partie arrière du couchage. Bien analyser le lit médical qui est utilisé afin de bien positionner les liaisons. Le couchage doit être toujours utilisé barrières de lit relevées.




Vous pouvez utiliser :

- a) 2 passants du milieu avec barrières de lit (confort maximum position assise liberté des jambes), vous devez impérativement relier ces deux passants au lit.
- b) 4 passants (milieu et bas) avec barrières de lit.
- c) 6 passants (milieu, bas et haut) avec barrières de lit.

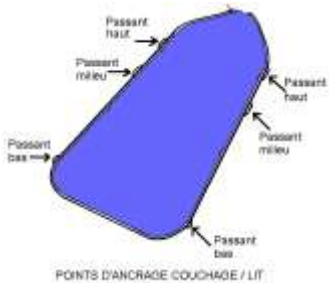


POINTS D'ANCRAGE COUCHAGE / LIT

L115 - L1000 Liaison 1000 pour utilisation latérale

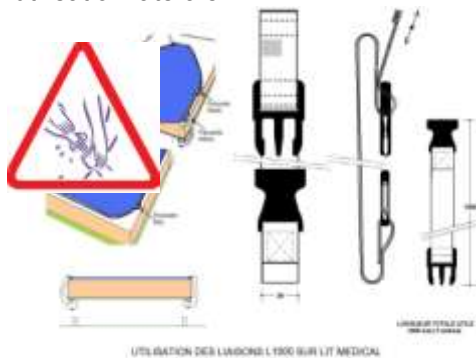

L3000 - Liaison 3000 pour utilisation sous le sommier

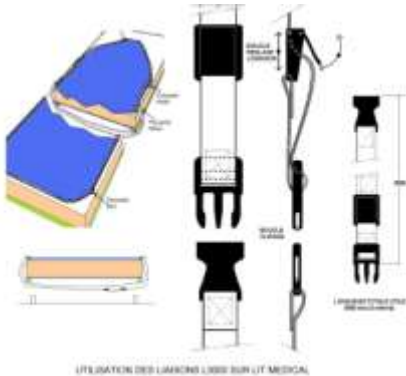

Attention au patient qui présente de réelles capacités de déshabillage et qui pourrait éventuellement atteindre la boucle de la L115 latéralement sur le sommier et se détacher ; Utilisez alors la liaison L3000 qui se clipse sous le sommier.




## Verrouillage du couchage



Le verrouillage du couchage est impératif.



Approcher les curseurs de la fermeture à glissière près d'une liaison couchage/lit et passer les deux boucles des curseurs dans la liaison.

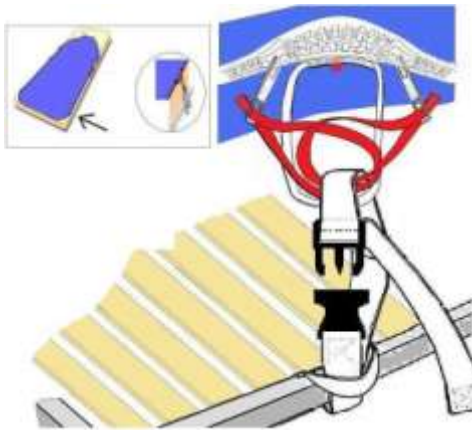

## Passage de sondes

Les sondes peuvent passer à l'intersection des deux curseurs de fermeture



Les toiles COCCOON satisfont à l'exigence de non-allumabilité mentionnée dans le décret N° 2000-164 du 23 Février 2000 relatif à la sécurité de certains articles de literie selon la norme NF EN ISO 12952-1 évaluation de l'allumabilité des articles de Literie : Source d'allumage : cigarette en combustion

Couchage Médical  
COCCOON C2T M (moyen)




3 770000 887020

## Maintenance

Ce dispositif médical doit être vérifié régulièrement. L'usure due à l'utilisation et au lavage peut être importante. A chaque utilisation le couchage doit être examiné. Si une usure du tissu, des coutures ou une dégradation le la fermeture à glissière sont constatées retirez le couchage et donnez-le en réparation. Votre fournisseur vous apportera l'expertise en matière de maintenance des dispositifs médicaux de Classe 1.

**GARANTIE :** Nos produits sont garantis 6 mois en cas de défaillance technique, à l'exclusion du non respect des conditions d'utilisation et d'entretien

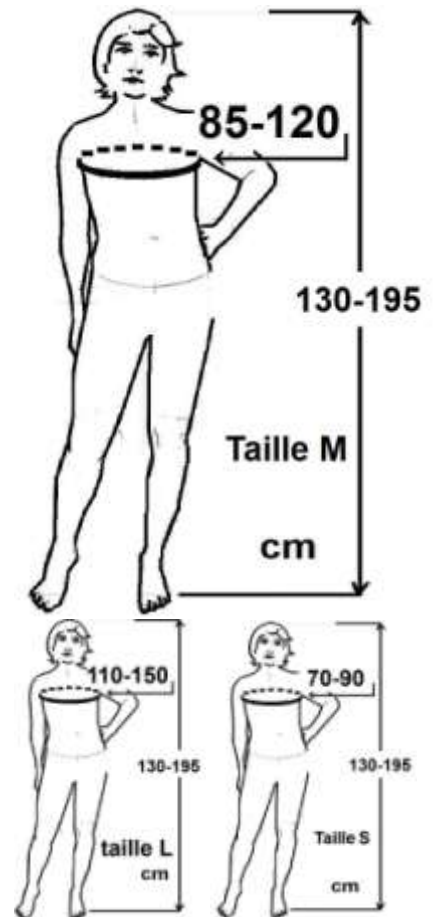

www.coccoon-tm.fr

**COCCOON**

1 rue de l'Abani

BP30032

57535 MARANGE-SILVANGE

Tél +33 3 87 51 55 97 Fax +33 3 87 51 92 84  
www.coccoon-tm.fr contact@coccoon-tm.fr

